

# SleepAngel<sup>®</sup> meditsiiniline madrats

## Puhastus- ja hooldusjuhend

Sleepangel<sup>®</sup> seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.



### 1. Kontrollimine ja hooldus

#### Toote seisundi kontrollimine korra nädalas või patsiendi lahkumisel

- Kontrollige tooteid visuaalselt ühenduskohtade pidavuse, katteriide ja filtri rikutuse ning nähtavate kahjustuste või aukude suhtes.
- Aukudega või kahjustatud kanga või filtriga toode on saastunud ning see toode visake haiglahajätmete hulka ehk utiliseerige.
- Puhastusainega niisutatud lappide kasutamisel polüuretaaniga kaetud pindadel soovitage pind pärast puhta veega üle pühkida. Veega üle pühkimine pikendab toote kanga ja filtri eluiga. Vastasel juhul hakkab kemikaal materjali lagundama, mistõttu toode on vastuvõtlikum vigastustele.

### 2. Ladustamine

- Madratsit saab ladustada ohutult pikali asendis. Ärge painutage madratsit.
- Kattemadratsit võib ladustada ka rullikeeratuna, kusjuures fikseerimiseks kasutatav pael või seos jätta lõdvalt ümber rulli, mitte sisse soonida.
- Ärge asetage madratsile raskusi
- Vältige PneumaPure<sup>™</sup> filtri painutamist ja venitamist.

### 3. Puhastusjuhised

- Tavapäraseks puhastamiseks kasutage õrnatoimelise pesuaine ja vee lahust.
- Kui katteriie on tugevalt määrdunud, võib kasutada 0,1% kloorilahust (1000 ppm) ja külma vett. Kui katteriidele on sattunud kehavedelikke (nt veri), võib puhastamiseks kasutada 1% kloorilahust (10 000 ppm) ja külma vett.
- 1% kloorilahuse (10 000 ppm) sage kasutamine võib lühendada kanga kasutusiga.
- **Märkus.** Alkoholiga niisutatud lappide ja puhastuslahuste kasutamine võib mõjutada ajutiselt katteriide pinda ning muuta selle mehaaniliste kahjustuste suhtes tundlikumaks. Enne toote kasutamise jätkamist puhastage toode veega ja laske sellel täielikult kuivada. Voodipesu vahetage ettevaatlikult ja vältige mehaanilisi vigastusi.
- PneumaPure<sup>™</sup> filtri puhastamine käib samamoodi.
- Vältige filtri ja kanga tugevat hõõrumist.



Ärge kasutage pleegitusaineid, masinpesu, kuivpuhastust ega trummelkuivatust ja ärge triikige toodet.

Gabriel Scientific OÜ  
Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia  
Tel: +372 56605967  
[www.sleepangel-medical.com](http://www.sleepangel-medical.com)

# SleepAngel<sup>®</sup>

# SleepAngel® meditsiiniline madrats

## Puhastus- ja hooldusjuhend

Sleepangel® seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.



### Puhastus- ja desinfitseerimistooted, mida võib kasutada:

- 1% Hydrogene Peroxide Solution
- Amonium Compounds
- Anios Oxy'Floor
- Aniospray Quick
- Bacillol AF
- Bacillol Foam
- Bactacid Wipes
- Cavi Cide Surface Decontaminant Cleaner
- Cavi Wipes
- Chlorine Dioxide Solution, 10.000 ppm
- Chlorine Releasing Solution, 1000 ppm
- Clinell Alcohol Wipes
- Clinell Sporicidal Wipe
- Clinell Universal Spray
- Ecopine, (5% Solution in Water)
- Incidin Foam & Incidin Plus
- Incidin Pro
- Isopropyl Alcohol, (70%)
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Foam Pure
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Mikrozyd AF Liquid
- Mikrozyd Sensitive Liquid
- Mikrozyd Sensitive wipes
- NaOH Solution
- Oxivir Plus

- PDI Sani Cloth AF3 Wipes
- Perform 1% and 3%
- Phenol Solution, 1%
- Rely+ON Perasafe
- Sani-Cloth Active
- Spray Off
- Sterisept wipes
- Super Sani Cloth Germicidal Disposable Wipe
- Terralin® protect (max. 4%)
- TPH Protect
- Virusolve (5% & 10% Solution in Water)
- Wet Wipe

### Puhastus- ja desinfitseerimistooted, mida ei soovita kasutada:

- Disclean ENDO PAA (Peracetic Acid Solution)
- PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe
- Peracetic Acid

Need loetelud ei ole ammendavad.

Toodud kontsentratsioone tuleb rangelt järgida ja mitte ületada.

