

SleepAngel® meditsiinilised padjad ja tekid

Puhastus- ja hooldusjuhend

Sleepangel® seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.



1. Kontrollimine ja hooldus

Toote seisundi kontrollimine korra nädalas või patsiendi lahkumisel

- Kontrollige tooteid visuaalselt ühenduskohtade pidavuse, katteriide ja filtri rikutuse ning nähtavate kahjustuste või aukude suhtes.
- Aukudega või kahjustatud kanga või filtriga toode on saastunud ning see toode visake haiglahajätmete hulka ehk utiliseerige.
- Puhastusainega niisutatud lappide kasutamisel polüuretaaniga kaetud pindadel soovitage pind pärast puhta veega üle pühkida. Veega üle pühkimine pikendab toote kanga ja filtri eluiga. Vastasel juhul hakkab kemikaal materjali lagundama, mistõttu toode on vastuvõtlikum vigastustele.

2. Ladustamine

- Patja saab ladustada ohutult pikali asendis, küljele või otsale paigutatuna. Ärge painutage patja.
- Tekki võib ladustada lahtirullituna, kokkuvoldituna või kokkurullituna, sealjuures tuleb vältida PneumaPure™ filtri painutamist ja venitamist.
- Ärge asetage toodetele raskusi.

3. Puhastusjuhised

- Kui katteriie on tugevalt määrdunud, võib kasutada 0,1% kloorilahust (1000 ppm) ja külma vett. Kui katteriidele on sattunud kehavedelikke (nt veri), võib puhastamiseks kasutada 1% kloorilahust (10 000 mlnk) ja külma vett.
- 1% kloorilahuse (10 000 ppm) sagedas kasutamine võib lühendada kanga kasutusiga.
- **Märkus.** Alkoholiga niisutatud lappide ja puhastuslahuste kasutamine võib mõjutada ajutiselt katteriide pinda ning muuta selle mehaaniliste kahjustuste suhtes tundlikumaks. Enne toote kasutamise jätkamist puhastage toode veega ja laske sellel täielikult kuivada. Voodipesu vahetage ettevaatlikult ja vältige mehaanilisi vigastusi.
- PneumaPure™ filtri puhastamine käib samamoodi.
- Vältige filtri ja kanga tugevat hõõrumist.



Ärge kasutage pleegitusaineid, masinpesu, kuivpuhastust ega trummelkuivatust ja ärge triikige toodet.

SleepAngel® meditsiinilised padjad ja tekid

Puhastus- ja hooldusjuhend

Sleepangel® seadmed on valmis kohe kasutusele võtmiseks. Toode ei ole steriliseeritud.



Puhastus- ja desinfitseerimistooted, mida võib kasutada:

- 1% Hydrogene Peroxide Solution
- Anios Oxy'Floor
- Aniospray Quick
- AntiGone
- Bacillol AF
- Bacillol Foam
- Bactacid Wipes
- Chemisept wipes
- Chlorine Dioxide Solution, 10.000 ppm
- Chlorine Releasing Solution, 1000 ppm
- Clinell Sporicidal Wipe
- Descosept PUR Wipes RTU
- Desinfektionstuch
- Ecopine, (5% Solution in Water)
- Incidin Pro
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Mikrozyd Sensitive Liquid
- Mikrozyd Sensitive wipes
- Perform 1% and 3%
- Reinigungstuch cleaning wipes
- Rely+ON Perasafe
- Rely+ON Virkon
- Sani-Cloth Active
- Sterisept wipes
- Terralin® protect (max. 4%)

- TPH Protect
- Virusolve (5% & 10% Solution in Water)

Puhastus- ja desinfitseerimistooted, mida ei soovita kasutada:

- Disclean ENDO PAA (Peracetic Acid Solution)
- PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe
- Peracetic Acid

Need loetelud ei ole ammendavad.

Toodud kontsentratsioone tuleb rangelt järgida ja mitte ületada.

CE

Gabriel Scientific OÜ
Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
Tel: +372 56605967
www.sleepangel-medical.com

SleepAngel®