

TÄHTIS!

1. Toode ei ole steriilne, kasutada enne aegumiskuupäeva
2. Enne kasutamist kontrollige, kas pakk on terve. Katkisest pakist võetud maske kasutamine on keelatud! Kontrolli, kas metallriba on peidus, kui metallriba on nähtaval, ära toodet kasuta.
3. Enne kasutamist lugege tähelepanelikult kasutamisyjuhend.
4. Vaadake, et juuksed jms võõrkehad ei satuks maski sisse.
5. Ühekordseks kasutamiseks!

KASUTAMISJUHEND

1. VAATA: maski värviline pool peab jääma väljapoole, metallriba üleval pool.
2. PANE ETTE: kinnita mõlemad elastsed kinnituspaelad kõrvade taha.
3. KOHENDA: tõmba mask suureks nii, et see katab nina ja lõua.
4. SURU: Suru õrnalt metallriba maski ülaosas nii, et see vormuks tugevalt ümber nina.

KASUTAMINE

Maske võib kanda mitte-invasiivsete raviprotseduuride läbiviimiseks. Mask peab kindlalt katma nina, lõua ja suu, et vältida patogeenide, mikroorganismide ja muude osakeste laiali kandumist.